

EyeGuardian™

Protetor Ocular

Informações Gerais

Nome do Produto

EyeGuardian™ Protetor Ocular


Descrição do Produto

EyeGuardian™ Protetor Ocular é utilizado para proteção dos olhos de pacientes anestesiados durante cirurgia. Garante que os olhos do paciente esteja fechado para reduzir o risco de ressecamento e, potencialmente, de abrasão da córnea.

Validade do produto: Indeterminado.

Fabricante: Sharn Inc. USA

REFERÊNCIA	Descrição	Dimensão	Pcs/Cx	Aba não adesiva
S2020	EyeGuardian	5,5cm x 2,9cm	100 pares	Azul claro

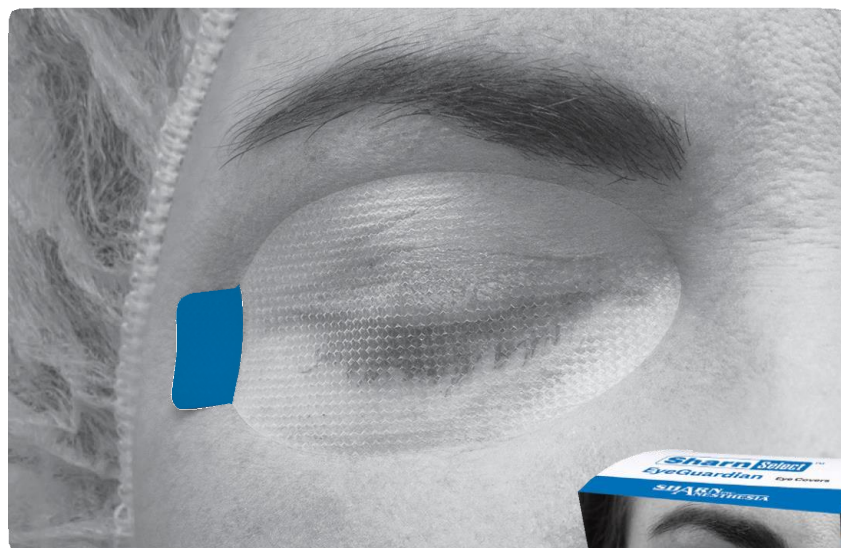

Princípio de Funcionamento

O EyeGuardian™ Protetor Ocular é feito de um material hipoalergênico, à prova d'água, respirável e livre de látex, que pode ser usado em todos os pacientes. A forma oval e o material flexível e fino proporcionam um bom ajuste e vedação ao redor dos olhos para máxima proteção. Não há necessidade de cortar o protetor ou adicionar fita adesiva sobre ele. Proporciona uma barreira respirável resistente a fluidos e, o material transparente permite verificar se o olho está adequadamente fechado durante a cirurgia. O protetor é feito com uma formulação especial de adesivo grau médico que protege e é suave para a pele fina e frágil ao redor dos olhos e para os cílios. A aba não adesiva facilita a aplicação, reposicionamento e remoção mesmo com as mãos molhadas ou enluvadas.

MEM CIRÚRGICA LTDA

www.memcirurgica.com.br

PEDIDOS: (11) 5539-7557

BRA-Rev. 01.2019

Utilização

1. Descole o protetor ocular da folha de liberação usando a aba colorida;
2. Delicadamente coloque-o sobre o olho aplicando uma leve pressão sobre a pálpebra e nas bordas do protetor;
3. Para remover ou reposicionar puxe a tab colorida descolando o protetor. Se removendo, descarte de acordo com o protocolo do hospital. Se reposicionando, repita o passo 2.

Composição


O EyeGuardian™ Protetor Ocular é feito de um filme de Polipropileno transparente. É revestido em um lado com um adesivo acrílico de grau médico sensível a pressão e no outro lado com silicone peso base de 78 lb. A aba não adesiva é feita de polietileno de alta densidade natural.

Condições de Armazenamento e Transporte

Armazene na embalagem de proteção original a temperaturas entre 10-26,6 °C e 40-60% de umidade relativa.

Condições de Manipulação

O produto deve ser descartado após o uso conforme o procedimento local padrão de descarte de material médico-hospitalar estabelecido pela Instituição.

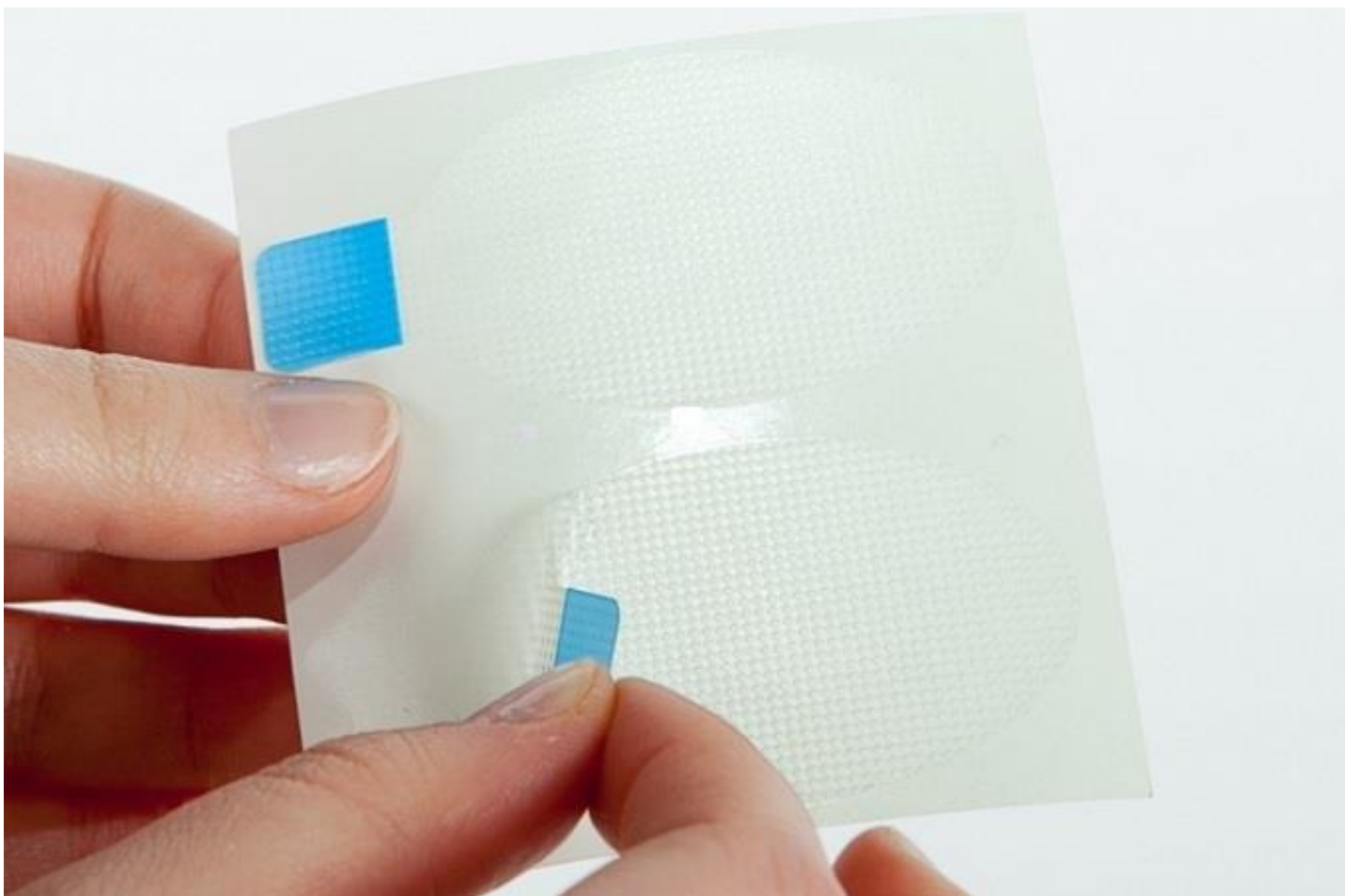

Vídeo do Fabricante (*Em inglês*) – Aplicação Correta

<https://www.youtube.com/watch?v=tUwg8Ncx68>



Esterilização: N/A

Validade: Indeterminado

Advertências

Observe a correlação da versão da instrução de uso indicada no rótulo do produto adquirido e a deste Manual.

Contraindicações

Não devem ser usados em feridas.

Precauções

Não usar em pacientes com alergia conhecida aos componentes do protetor ocular.

Efeitos Adversos

Alergia em paciente alérgico aos componentes do protetor ocular.

Notificação ANVISA: 80109170031

Para obter, sem custo adicional, as instruções de uso do produto no formato impresso, solicite através dos nossos canais:

SAC:

(11) 5539-7557

Responsável Técnica: Andréa Mesquita Roese